

Sedia Portantina modello 40-EV e 42-EV



Specifiche*

A	92 cm
B	74 cm
C	53 cm
D	92 cm
E	17 cm
F	53 cm



..... 9 kg



..... 10.4 kg

* Le dimensioni sono arrotondate al numero intero più vicino.

Nota: In questo manuale viene usata la sedia modello 42-EV per descrivere le caratteristiche comuni tra il modello 42-EV e 40-EV.

Importante:


Le Sedie Portantina modello 42-EV e 40-EV sono dei dispositivi medici studiati per aiutare la movimentazione del paziente verso la barella da ambulanza usata per il successivo trasporto verso la struttura medica. Adoperare la Sedia Portantina in accordo alle leggi ed ai protocolli del paese dove viene usata. Consultare le autorità di competenza per informazioni riguardanti leggi e protocolli e per risolvere ogni possibile dubbio prima di usare la Sedia Portantina col paziente.

Carico Limite

Modello 40-EV



Modello 42-EV

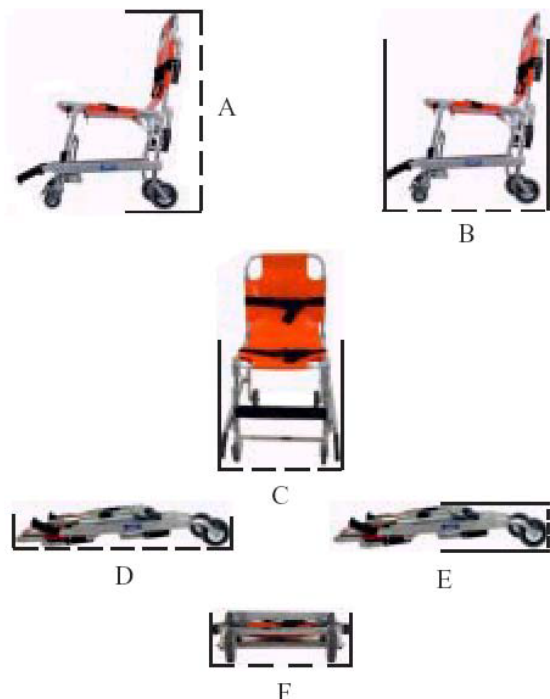


FERNO WASHINGTON ITALIA S.r.l. • Via B. Zallone 26, Pieve di Cento, 40066 (BO)

• Tel. +39 051 6860028 • Fax +39 051 6861508 • E-mail info@ferno.it; • Internet: www.ferno.it

A. Apertura della sedia



1

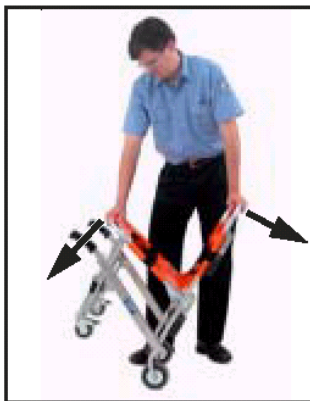


2



B. Chiusura della sedia




1

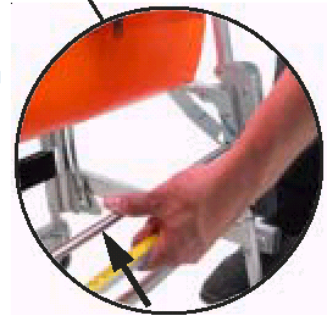



2




3

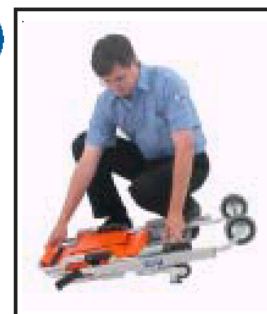


C. Sollevamento delle maniglie frontali

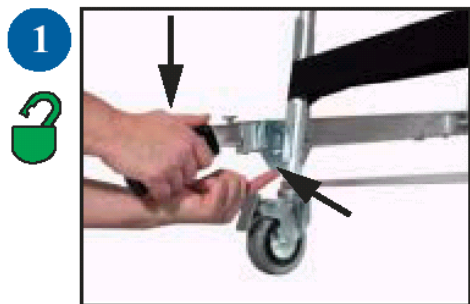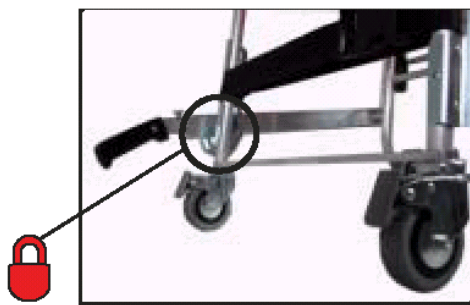

D. Abbassamento delle maniglie frontali

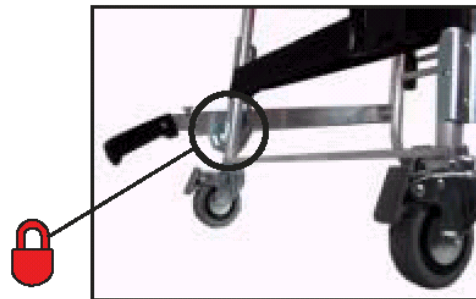


E. Estensione delle maniglie frontali

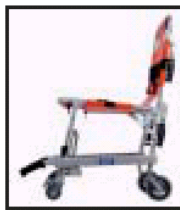

1




2

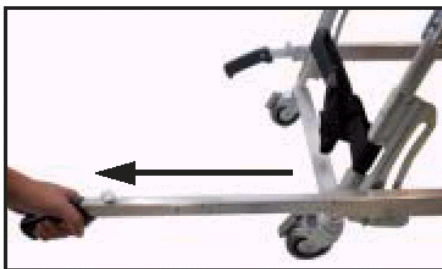

F. Arretramento delle maniglie frontali



1

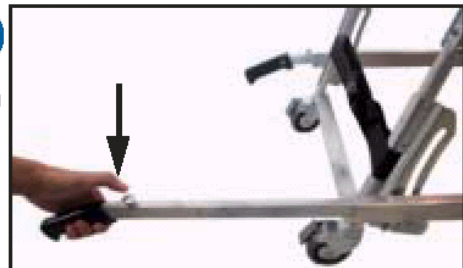

2




G. Maniglie posteriori




I. Come assicurare il paziente alla sedia con le cinture



H. Freno ruote - 42-EV

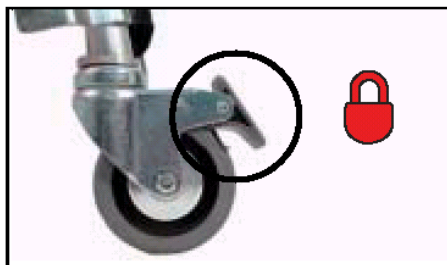

J. Trasporto della sedia per le scale

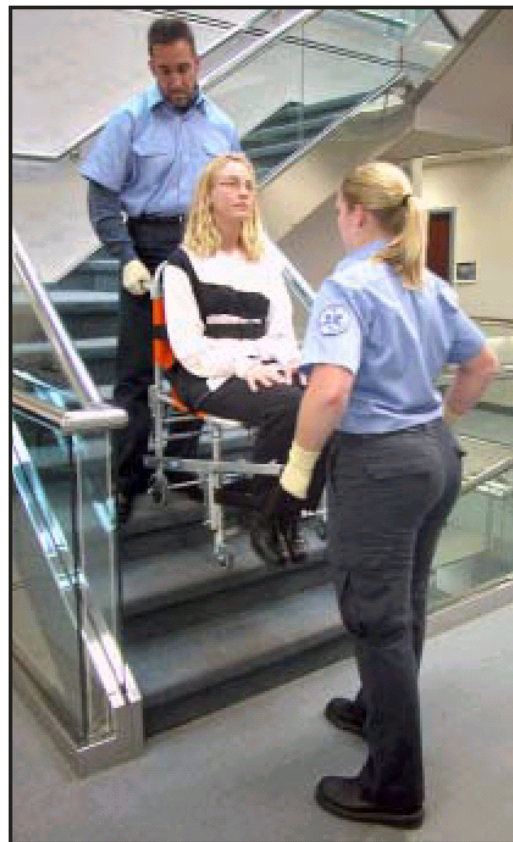

K. Spostamento della sedia 40-EV



M. Sollevamento della sedia su ostacoli



L. Spostamento della sedia 42-EV



⚠ ATTENZIONE

L'uso improprio della sedia può causare lesioni. Usare la sedia solo per lo scopo descritto in questo manuale.

Operatori non addestrati possono causare lesioni o lesionarsi. Permettere l'uso della sedia solo a personale addestrato.

Operazioni improprie possono causare lesioni. Adoperare la sedia solo come descritto in questo manuale.

Un paziente abbandonato può provocarsi lesioni. Restare sempre con il paziente.

Un paziente non assicurato con le cinture può cadere dalla sedia e provocarsi lesioni. Usare le cinture per assicurare il paziente alla sedia.

Aiutanti non addestrati possono causare lesioni o lesionarsi. Adoperare e mantenere il controllo della sedia dando direttive agli aiutanti.

Una manutenzione impropria può causare lesioni. Eseguire la manutenzione della sedia solo come descritto nel manuale di manutenzione fornito.